


> OSVĚDČENÉ POSTUPY ÚDRŽBY KATÉTRU

V souladu s pokyny pro osvědčené postupy a klinickými studiemi podporuje společnost Kimal osvědčené postupy péče o katétr a jeho údržbu, které pomáhají zlepšit průchodnost katétru.

KROK 1

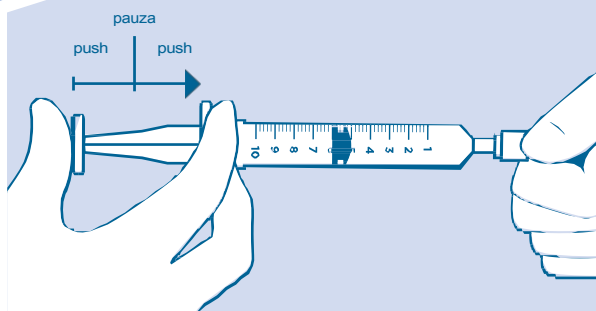


> PUSH-PAUSE PROPLACH

Bylo prokázáno, že proplachování Push-Pause pomáhá odstranit veškeré nečistoty z vnitřku katétru a zlepšuje průchodnost.(1)

1. Katétr prudce propláchněte podle doporučení v DFU výrobku.
2. Přibližně po každém ml tekutiny udělejte krátkou pauzu.
3. Pokračujte ve výplachu a přerušte ho až do posledního ml tekutiny, po kterém se které odpojí přetlakem.

KROK 2

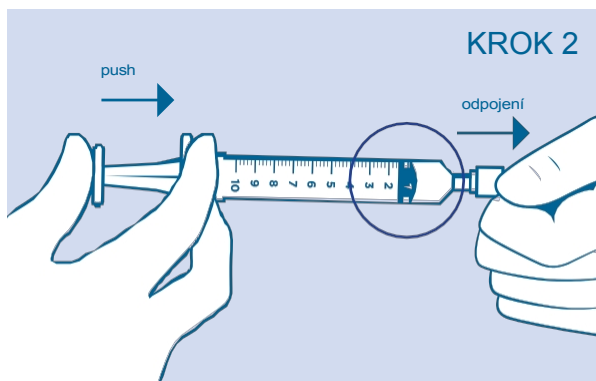

> ODPOJENÍ S POZITIVNÍM TLAKEM

Technika odpojení pozitivním tlakem pomáhá zlepšit průchodnost katétru při odpojování stříkačky od bezjehlového konektoru (2).

1. Katétr propláchněte v souladu s místním protokolem.
2. Po dosažení posledního 1 ml proplachovacího roztoku se použije technika odpojení s pozitivním tlakem.
3. Jakmile začnete pomalu odpojovat stříkačku od bezjehlového konektoru, vytlačte zbývající 1 ml proplachovacího roztoku.
4. Pokračujte v závěrečném proplachování, dokud se stříkačka zcela neuvolní z bezjehlového konektoru.
5. Technika odpojení s pozitivním tlakem by měla pomoci zabránit zpětnému toku krve do lumen katétru při odpojení stříkačky.

Odkazy:

1. Ferroni, A. et al. (2014) Pulzující proplachování jako strategie prevence bakteriální kolonizace zařízení pro cévní přístup. Zdravotnické prostředky: Evidence and Research. November 2014.
2. Journal of Infusion Nursing. (2011) Infusion Nursing Standards of Practice. 45 U. Vol 34, No. 15.

Pro více informací, ceny nebo vzorky se obraťte na místního zástupce společnosti Kimal nebo kontaktujte:

UK
Tel: +44 (0)845 437 9542
Fax: +44 (0)845 437 9544
E-mail: customer care@kimal.co.uk

NĚMECKO
Tel: +49 (0)2133 285 141
Fax: +49 (0)2133 285 1420
Email: info@kimal.de

BLÍZKÝ VÝCHOD
Tel: +97 16 552 8146
Fax: +97 16 552 8147
Email: mea@kimal.co.uk

MEZINÁRODNÍ
Tel: +44 (0)845 437 9543
Fax: +44 (0)845 437 9544
Email: Emailinternationalenquiries@kimal.co.uk

© 2019 Kimal PLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti Kimal PLC.

Společnost Kimal PLC si vyhrazuje právo změnit specifikaci svých výrobků. Kimal PLC, Arundel Road, Uxbridge, UB8 2SA.